

eakin
dot[®]

eakin dot[®] 2dílný plochý systém

eakin dot[®] – větší rozdíl



eakin[®] ™

A SMALL PART
OF A BIGGER LIFE. •

Dvoudílný sáček své vlastní třídy s **3 jedinečnými inovacemi**

Dvoudílný sáček eakin **dot**[®] je řešením problémů a obav zákazníků. Život s ním je o malý kousek jednodušší.

Je **bezpečný, rychle a snadno se mění** a jeho nošení je pohodlné díky 3 jedinečným inovacím:



Fialový vodící kroužek

Fialový vodící kroužek na vytahovací manžetě je jasná vizuální pomůcka, která vám pomůže lokalizovat kroužek a zámeček. Výměna sáčku je tak snazší a rychlejší.



Hydrokoloid *skinsmart*[™] pro delší nošení

Hydrokoloid *skinsmart*[™] s **prodlouženou životností zajišťuje okamžité přilnutí** prodlouženou dobu nošení a pocit jistoty tam, kde je nejvíce potřeba. Manžeta s pěnovou spodní vrstvou se šesti průřezy dodává extra pohodlí a flexibilitu.



Možnost sloupnutí

Bezpečné připevnění sáčku je potvrzeno slyšitelným **zacvaknutím**. Sáček můžete z manžety v případě výměny sloupnout. Tak máte vše maximálně pod kontrolou, hrozí menší riziko úniku a výměna sáčku je celkově rychlejší.

hydrokoloid *skinsmart*[™] blíže a podrobněji

Náš hydrokoloid *skinsmart*[™] s **prodlouženou životností** má 3 vlastnosti, o kterých byste podle nás měli vědět:



Okamžité přilnutí

Díky jedinečnému složení přilne hydrokoloid , *skinsmart*[™] **okamžitě k pokožce**. Výměna sáčku je rychlejší (a váš den delší).



Prodloužená životnost

Díky vysoce kvalitním adhezním vlastnostem drží hydrokoloid *skinsmart*[™] **po delší dobu**, a to i v těch nejobtížnějších podmínkách.



Vynikající bezpečnost a pohodlí

Zajištěná výjimečně silnou přilnavostí, přizpůsobivostí a šetrností k pokožce.

3 důvody pro používání dvoudílného sáčku eakin dot[®]

Vyšší bezpečnost

- Bezpečný zámeček, který zapadne se slyšitelným 'ZACVAKNUTÍM'.
- Díky možnosti 'SLOUPNUTÍ' máte větší kontrolu při výměně sáčku.
- Hydrokoloid *skinsmart*[™] s **prodlouženou životností drží po delší dobu.**

*"Slyšitelné cvaknutí... Zvuk, který potěší."
"Poznám i rozpojení."*



Větší rychlost a pohodlí

- Díky výsuvné manžetě nemusíte při upevňování nového sáčku tlačit na břicho.
- Fialový vodící kroužek vám pomůže najít kroužek a zámeček.
- Sáček lze upevnit v různém úhlu – nemá povinný směr.

*"Vyměním si sáček mnohem rychleji."
"Prsty se dostanete pod kroužek opravdu snadno."*



Větší pohodlí a přizpůsobivost

- Manžeta s pěnovou spodní vrstvou pro extra pohodlí.
- Manžeta se 6 výřezy se přizpůsobí tvaru vašeho těla.
- Hydrokoloid *skinsmart*[™] pro delší životnost je šetrný k pokožce.

*"Mám kýlu, a tak mi ohebnost manžety velmi pomohla."
"Lze ji použít hned po operaci, protože není nutno tlačit na břicho."*



Návod k použití

Přiložení



1. VYTÁHNOUT

Po nalepení podložky nadzvedněte prsty nebo palci vytahovací část manžety.



2. ZAKLAPNOUT

Nasadte sáček na manžetu podložky a zaklapněte. Při správném spojení uslyšíte jasné "KLAP".

Sejmutí



3. SLOUPNOUT

Lehce "SLOUPNĚTE" sáček z manžety podložky.

Výrobky

eakin **doi**[®] 2-dílné ploché **uzavřené sáčky**

Číslo výrobku	Velikost sáčku	Velikost kroužku	Počet ks v balení
839900	Mini	60mm	30
839901	Standard	60mm	30
839902	Maxi	60mm	30
839920	Standard	80mm	30
839921	Maxi	80mm	30

eakin **doi**[®] 2-dílné ploché **výpustné sáčky**

Číslo výrobku	Velikost sáčku	Velikost kroužku	Počet ks v balení
839903	Mini	60mm	30
839904	Standard	60mm	30
839905	Maxi	60mm	30
839922	Standard	80mm	30
839923	Maxi	80mm	30

eakin **dot**[®] 2-dílné ploché **podložky**

Číslo výrobku	Velikost stomie	Velikost kroužku	Počet ks v balení
839800	CTF 15-37.5mm	60mm	5
839801	20mm	60mm	5
839802	22.5mm	60mm	5
839803	25mm	60mm	5
839804	27.5mm	60mm	5
839805	30mm	60mm	5
839806	32.5mm	60mm	5
839807	35mm	60mm	5
839808	37.5mm	60mm	5
839809	CTF 15-50mm	80mm	5
839810	40mm	80mm	5
839811	45mm	80mm	5
839812	50mm	80mm	5

