

eakin® ™



**Surround**™  
OCHRANA POKOŽKY

# JIŽ BEZ BOLESTÍ

**Surround™** Skin Protector kroužky umožňují úplnou ochranu pokožky – vytvářejí pro ni vodotěsnou antibakteriální bariéru. Jsou založeny na stejném principu, jako kroužky Eakin **Cohesive®**, což znamená mimořádnou trojnásobnou ochranu:

- 1) Absorbují vlhkost a tím chrání pokožku.
- 2) Redukují enzymatickou aktivitu, tím brání narušení kůže.
- 3) Udržují přirozené pH a brání biologickým a chemickým produktům v dráždění pokožky.

## PŘEDNOSTI

|| Již po sedmidenním používání **Surround™** je viditelné zlepšení stavu pokožky a snížení bolestivosti. ||

- Sníží podráždění pokožky
- Zajistí kompletní ochranu
- Zvýší komfort
- Absorbuje prosakující sekret
- Napomáhá hojení
- Snadno se aplikuje

## MOŽNOSTI POUŽITÍ

**Surround™** Skin Protector se může používat v mnoha situacích, například:

- PEG
- Vyústění katétrů
- Tracheostomie
- Drény
- ACE drény
- Punkční epicystostomie

|| Podstatné je, že při použití **Surround™** Skin Protector zůstává kůže bez podráždění a vyrážky, což je pro perkutánní vyústění výhodou. ||

# SNADNÉ POUŽITÍ

**Surround™** Skin Protector je snadné – ve 4 krocích:



Očistěte a osušte okolí



Odstraňte ochrannou papírovou folii



Umístěte **Surround™** Skin Protector dle potřeby, přesahujícími okraji utěsněte spojení s pokožkou



Mírným tlakem na okraje zabezpečte spojení

## PŘÍKLAD: POUŽITÍ U PEG



Před použitím ochranných pomůcek bývá kůže podrážděná a poškozená oděrkami.



**Surround™** Skin Protector kryje oblast kožního průniku a poskytuje kompletní ochranu.

Podle zkušeností zdravotních sester „velmi dobře kopíruje kožní povrch“.

**Surround™**  
OCHRANA POKOŽKY

# ČÍSLA VÝROBKŮ

	Průměr	Množství	Výrobní čísla
<b>Velké kroužky</b> Skin Protector	98 mm	10	839011
<b>Malé kroužky</b> Skin Protector	58 mm	20	839012



eakin® 

eakin® 

**Eakin CZ s.r.o.**

Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic  
**tel.: +420 800 110 110, [www.eakin.cz](http://www.eakin.cz)**