

## POPIS VÝROBKU

Eakin Cohesive® je tvárná, vlhkost pohlcující, kožní bariéra, zhotovená na ochranu kůže před škodlivým účinkem agresivních tělesných tekutin.

Eakin Cohesive® není nutné stříhat, můžete ho však vytvarovat, vyválet, natáhnout nebo stlačit do jakéhokoli tvaru, aby se přizpůsobil nerovnostem v kůži okolo stomií, ran a chirurgických vývodů. Vlhkost pohlcující vlastnosti výrobku Eakin Cohesive® zajišťují společně s vysokou přilnavostí na obou stranách bariéry nejen ochranu pokožky, ale i bezpečné připevnění jakéhokoli prostředku k tělu.

## INDIKACE

Eakin Cohesive® lze používat pro ochranu kůže jako:

- těsnící materiál kolem ran a chirurgických drenážních vývodů
- externí vyplňující materiál na nerovné kůži
- těsnění kolem stomií
- ochranu mokvavé pokožky

Eakin Cohesive® je vhodný k použití kolem ielostomií, kolostomií, urostomií, ran a chirurgických drenážních vývodů.

## KONTRAINDIKACE

Nepoužívejte k překrytí poškozené pokožky nebo otevřených ran.

## OPATŘENÍ

1. Ukládejte v krabici při pokojové teplotě. Nechladte.
2. Každý kryt Eakin Cohesive® Seal nebo kožní bariéra je určena pouze pro jedno použití.

## APLIKACE

1. Vždy se ujistěte, že je plocha pro aplikaci nebo plocha okolo stomie čistá, suchá a prostá jakýchkoli zbytků mastnoty nebo krému.
2. Sejměte krycí papíry z obou stran a jemně Eakin Cohesive® vytvarujte či natáhněte tak, aby vyhovoval požadavkům vašeho těla. Eakin Cohesive® lze jemně vytvarovat, vyválet, natáhnout nebo stlačit do jakéhokoli tvaru, aby se přizpůsobil nerovnému povrchu kůže a dokonale přilnul. Střihání není nutné, Eakin Cohesive® může však být přestřížen a znovu spojen, aby se lépe nasazoval kolem komplikovaných míst.
3. Zlehka přitlačte ke kůži a na chvíli přidržte, dokud Eakin Cohesive® bezpečně nepřilne.
4. Lehce Eakin Cohesive® přihladte směrem k základu stomie nebo k okraji rány, fistule nebo drenážního otvoru. Tím se zajistí bezpečnější přilnutí kolem postižené oblasti za maximální možné ochrany kůže.
5. Přiložte jakoukoli zdravotnickou pomůcku přímo na povrch Eakin Cohesive® a jemným tlakem přidržte, dokud bezpečně nepřilne.

Za určitých okolností, například při velkých nerovnostech kůže nebo pokud je potřebná větší ochrana, můžete podle potřeby rozšířit nebo posílit přilnutí použitím více než jednoho krytu Eakin Cohesive® Seal nebo Skin Barrier. Je také možné kombinovat různé tvary a velikosti krytů Eakin Cohesive®.

## SEJMUTÍ

Eakin Cohesive® nepoškozuje při sundávání kůži.

1. Opatrně odstraňte z těla zdravotnickou pomůcku.
2. Opatrně odlepte a srolujte Eakin Cohesive® od vnějšího okraje bariéry nebo krytu.
3. Jakékoli zbytky odstraníme jemným válením a sloupnutím.
4. Pro odstranění lepkavosti z těla nebo zdravotnické potřeby můžete použít jakýkoli emulgující materiál nebo odstraňovač zdravotnického lepidla.

Eakin Cohesive® je na obou stranách vysoce lepkavý. Tato lepkavost je důležitým faktorem pro zajištění ochrany kůže, který se zároveň postará, aby zdravotní pomůcka zůstala na svém místě a nehrozilo nebezpečí náhodného odstranění.