

eakin[®]  TM

Naprostá Jistota
A Pocit Klidu



Cohesive
SLIMS[®]

NETĚSNÍ?... ...TO UŽ SE NESTANE

- Těsnící kroužky Cohesive SLIMS® přiložte opatrně na kůži kolem stomie před upevněním příruby nebo sáčku. Kroužky utěsňují prostor v okolí stomie a zabraňují úniku tekutiny.
- Upevnění sáčku je při použití Cohesive SLIMS® spolehlivější, což poskytuje jeho nositeli pocit naprosté jistoty a klidu.
- Kroužky Cohesive SLIMS® Vám často umožní nosit sběrný sáček déle, neboť upevnění sáčku je díky dodatečnému utěsnění spolehlivější.

Rok od roku vzrůstá na celém světě počet pacientů, kteří oceňují novou úroveň klidu, jistoty a komfortu, představovanou těsnícími kroužky Cohesive SLIMS®. Proč zůstat doma, když můžete jít ven – bude Vás doprovázet pocit jistoty, neboť Vás chrání Cohesive SLIMS®.



|| Na těsnící schopnosti Cohesive SLIMS® se mohou spolehnout. ||

|| Kroužky Cohesive SLIMS® umožňují lepší utěsnění a dodávají mi tak jistotu. ||



Jen pro jedno použití.



Udržujte v suchu. Chraňte před vysokou vlhkostí.



Uchovávejte v krabičce při pokojové teplotě. Nedávejte do chladničky.


OCHRANA KŮŽE

Dochází u Vás občas k zarudnutí a bolestivosti nebo podráždění kůže kolem stomie?

Zní-li odpověď ano, nejste sami. Podle nejnovější studie* trpí 45 % pacientů se stomií kožními problémy, které postihují okolí stomie.

Většina těchto lidí si však tyto komplikace neuvědomuje, nevěnuje jim pozornost nebo si je nepřipouští.

Citlivost nebo bolestivost kůže v okolí stomie je způsobena kontaktem kůže s vylučovanými tekutinami či exkrementy. Mnoho pacientů si myslí, že zarudnutí a citlivost kůže kolem stomie je normální a je třeba se s tím smířit. Tomuto stavu však lze zabránit, jak ukazují následující obrázky:

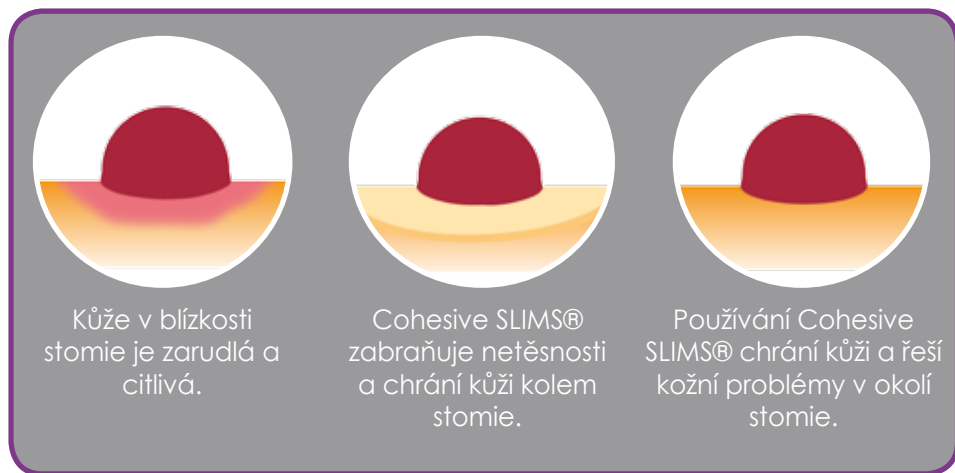

Proč byste se měli smířit s citlivou nebo bolestivou kůží kolem stomie?

Máte-li pocit, že kůže kolem stomie není v pořádku, obraťte se prosím na Vaši stomickou sestru.

*"Are Peristomal Skin Disorders Inevitable?" ["Je poškození kůže v okolí stomie nevyhnutelné?"] Herlufsen, Grete Olsen, Carlsen, Nybaek, Karlsmark & Jemec, Kongres WCET, červenec 2006.

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Používání těsnících kroužků Cohesive SLIMS® je snadné a rychlé. Přiložení kroužku na podrážděnou pokožku nepřináší obtíže a nevyvolává nepříjemné pocity. Jednoduše jej roztáhněte podle tvaru a velikosti Vaší stomie a přiložte přímo na kůži kolem stomie. Těsnící kroužky Cohesive SLIMS® je možné používat na okolí kolostomií, ileostomií i urostomií, a to v kombinaci se všemi druhy sáčků.
- Cohesive SLIMS® neztrácí svou lepivost, můžete s nimi proto manipulovat podle libosti. Jestliže se kroužek při roztahování roztrhne, stačí jej pouze spojit opět dohromady – podobně jako plastelínu.



Způsob použití Cohesive SLIMS®

1 Očistěte a osušte kůži v okolí stomie.



2 Cohesive SLIMS® zahřejte a roztáhněte na správnou velikost, aby jej bylo možné snadno přiložit na okolí stomie.



3 Umístěte kroužek Cohesive SLIMS® na kůži kolem stomie. Měl by dokonale krýt kůži v okolí i těsně blízkosti stomie.



4 Sběrný sáček si nasadte zvyklým způsobem a přidržte jej pevně na svém místě po dobu 30 vteřin.

|| Těsnící kroužky Cohesive SLIMS® se používají snadněji, při neobvyklém tvaru stomie a hlubokých kožních záhybech na obou jejích stranách se Cohesive SLIMS® dobře vytvaruje a přilne ||

Cohesive
SLIMS®



"Používání kroužků Cohesive SLIMS® mi přineslo nový pocit jistoty a duševního klidu - nejen proto, že dokonale těsní, ale zejména kvůli tomu, že se kůže v okolí stomie zcela zahojila. Se stomií žiji téměř 38 let a stal jsem se alergickým na všechny výrobky aktuálně dostupné na trhu. Má profese vyžaduje časté cestování a z ileostomie nyní již nemám obavy. Mohu dokonce začít hrát znovu golf!"

Uživatel Cohesive SLIMS®, Německo

"Pane Eakine, děkuji Vám, že jste vynalezl Cohesive SLIMS®. Narodila jsem se předčasně, ve 25. týdnu těhotenství. Když mi bylo šest dní, proděravělo se mi střevo a museli mi udělat dva vývody. Stomické sestřičky používají na ochranu mé kůže těsnící kroužky Cohesive SLIMS®. Jejich velikost vždy upraví tak, aby dobře chránily okolí vývodu. Mohu tak nosit sáček někdy i celý týden. Kůži již nemám vůbec bolavou a mohu ležet i na břiše, aniž by cokoli protékalo ven. Ještě jednou Vám moc děkuji.

Jessica, Austrálie."






Cohesive® byl vyvinut v Severním Irsku a jeho schopnost perfektně těsnit a zároveň chránit kůži je dokonale prověřena více než 30 lety jeho používání.

Bližší informace o TG Eakin Ltd naleznete na našich webových stránkách:

www.eakin.eu

Cohesive®

Pro dokonalý pocit klidu a jistoty zvolte těsnící kroužky na stomie z produktové řady Cohesive®. Zbavte se obav z nedostatečně utěsněného nalepeného stomického sáčku a dodejte si jistoty!

	Cohesive SLIMS® Dokonalé utěsnění, komfort a spolehlivost pro všechny typy, tvary a velikosti stomií. Velikost balení: 30 těsnících kroužků REF 839005
	Cohesive® Seals Small Cohesive® Seals (Malé těsnící kroužky) mají stejný tvar i velikost jako Cohesive SLIMS®, ale jsou zvláště silné. Používají se k mimořádné ochraně kůže, jsou vhodné u pacientů s problematickou pokožkou nebo v případě závažných problémů s netěsností. Velikost balení: 30 těsnících kroužků REF 839002
	Large Cohesive® Seals Large Cohesive® Seals (Velké těsnící kroužky) kryjí širší plochu kůže okolo vývodu a chrání ji tak ve větším rozsahu. Jsou vhodné pro pacienty s urostomiemi nebo u lidí s citlivou pokožkou, u kterých dochází při použití jiných výrobků k místnímu podráždění kůže. Velikost balení: 10 těsnících kroužků REF 839001

eakin® 

 Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road,
Comber
Northern Ireland
BT23 5QY

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.
Hlínky 64, 603 00 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 800 110 110
e-mail: asistentka@eakin.cz
web: www.eakin.cz