

eakin® ™



Release™
ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA

NEDRÁŽDÍ!

Release™ odstraňovač lepu vám umožňuje sejmout sáček a odstranit další zbytky po lepidle snadno a rychle. A co je nejdůležitější – bezbolestně.

Je k dispozici ve sprayi i v rouškách. Zdokonalené složení na základě silikonu je zcela bez alkoholu a chová se velmi vlídně k pokožce jako všechny výrobky Eakin.

SVĚŽÍ MÁTOVÁ VŮNĚ



Na rozdíl od mnoha jiných odstraňovačů lepu na trhu **Release™** pomáhá pomocí svěží mátové vůně zakrývat pachy, máte tedy pocit větší jistoty a diskrétnosti.



ZVLHČUJE POKOŽKU

Díky přidavku vitamínu E **Release™** rovněž zvlhčuje a zjemňuje kůži a pomáhá udržovat zdravou kůži v okolí stomie.

RYCHLESCHNOUCÍ SLOŽENÍ

Při aplikaci na kůži zasychá během několika vteřin bez změny kvality přilepení dalšího sáčku.

Ubrousky i spray **Release™** můžete použít dohromady i zvlášť dle potřeby.

1



Pro bezbolestné sejmutí sáčku nastříkejte **Release™** kolem okrajů lepení a několik vteřin vyčkejte.

Release™ aerosol můžete nastříkat k libovolnému okraji.

2



Šetrně odstraňte z pokožky lepidlo – je-li to nutné, použijte **Release™** opakovaně.

3



Zbytky lepidla z kůže setřete rouškou **Release™**.

4



Release™ velmi rychle zasychá a nenarušuje kvalitu přilepení další pomůcky nebo krytí.

Vyzkoušejte **Release™**
- mátovou svěžest a
bezbolestné řešení při
odstraňování lepu!



HIGHLY
FLAMMABLE

Release™
ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA

	Balení	Výrobní číslo
 Release™ Aerosol	1 x 50ml e	839023
 Release™ ubrousky	30 sáčků	839024

POZNÁMKY UŽIVATELŮ

„ Z kůže přímo cítím hebkost. „

„ Mám ráda čerstvou vůni máty. Po výměně sáčku nemusím používat osvěžovač vzduchu jako obvykle. „

„ Sejmutí sáčku bylo mnohem snazší. Už není nutné tahat za kůži, což bývá bolestivé. Ne s tímto výrobkem. „

eakin® 

eakin® 

Eakin CZ s.r.o.

Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic

Tel.: +420 800 110 110

e-mail: asistentka@eakin.cz

web: www.eakin.cz

 Manufactured by:
TG Eakin Limited
15 Ballystockart Road,
Comber
Northern Ireland,
BT23 5QY