

eakin<sup>®</sup>  <sup>TM</sup>


Pohodlí a Jistota



Cohesive<sup>®</sup> PASTE

# JAK PŮSOBÍ

Pasta **Cohesive® PASTE** je založena na stejné bázi jako ostatní výrobky **Cohesive®** a chrání peristomální pokožku naprosto stejným způsobem:

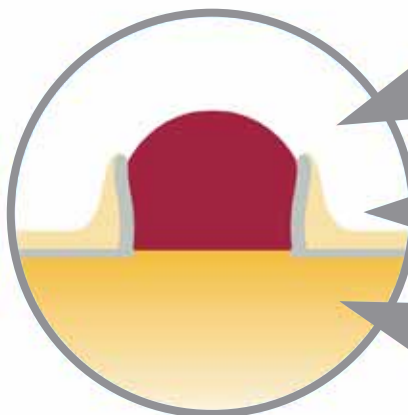

**Absorbuje vlhkost** a odvádí ji od pokožky.

**Snižuje aktivitu trávicích enzymů**, čímž jim zabráňuje v narušování pokožky.

**Udržuje přirozené pH** a zabráňuje styku pokožky s biologickými a chemickými dráždidly.



“ (S Cohesive® PASTE) Nemusím si měnit sáček tak často, což znamená, že nemám červenou a podrážděnou pokožku! ”

# POHODLÍ A JISTOTA



**Cohesive® PASTE** je ojedinělá pasta na stomie. Je to unikátní pasta bez alkoholu poskytující vysokou úroveň pohodlí a jistoty.

**Cohesive® PASTE** pochází ze stejné rodiny výrobků jako **Cohesive® Seals** a **Cohesive SLIMS®** a je založeno na stejné bázi, která chrání peristomální pokožku už déle než 30 let.

“ Miluji **Cohesive® PASTE**, zajišťuje mi pohodlí a je velmi snadná na použití. ”

## NEOBSAHUJE ALKOHOL

- Žádné výrobky Eakin® neobsahují alkohol a jsou tudíž velmi vlídné k pokožce. **Cohesive® PASTE** je velice pohodlná, protože nepálí tak jako tradiční pasty na stomie.
- Nepřítomnost alkoholu také znamená, že **Cohesive® PASTE** nevyschne. Nedochozí tudíž ke ztrátám, pokud náhodou neuzavřete tubu.



“ Při nanášení pasty (**Cohesive®**) na podrážděnou pokožku nemám nutkání křičet. ”

# VLÍDNÁ K POKOŽCE

Když jsme uživatele požádali, aby nám popsali stav své pokožky pod pastou **Cohesive® PASTE**, odpovědi byly velmi příznivé:

- „Kožní vřídky kolem mé stomie už se zahojily.“
- „Při používání pasty je moje pokožka zdravější“
- „Nanášení **Cohesive® PASTE** je pohodlné“
- „Stav mé pokožky se zlepšil, už není tak červená“
- „Co jsem začal používat tuto pastu, pokožka se mi zahojila a přestala mě svědit“.

## SNADNÉ POUŽITÍ

- Použití **Cohesive® PASTE** je rychlé a snadné. Přilne k vlhké pokožce a před nasazením sáčku není potřeba čekat, než pasta uschne.
- **Cohesive® PASTE** u kolostomií, ileostomií a urostomií a pro vyplňování hlubokých kožních záhybů, jizev nebo nerovných povrchů. Je použitelná se všemi typy sáčků.
- **Cohesive® PASTE** se po nanesení přemění na gel a netvrdne jako tradiční pasty na stomie. Je proto pohodlná a velmi snadno se odstraňuje.
- S pastou **Cohesive® PASTE** není nutné používat žádné dodatečné pudry nebo krémy a může se používat společně s **Cohesive SLIMS®** nebo **Cohesive®** Seals.

## Používání Cohesive® PASTE místo jiných past:

1



Očistěte a osušte okolní pokožku a ujistěte se, že je pokožka zbavená rozpouštědel, pudrů a mastných látek.

2



Vmáčkněte pastu do kožních záhybů, jizev a nerovných povrchů.

3



Naneste pastu na pokožku okolo stomie. Měla by pokrývat celý obvod stomie.

4



Nasadte sáček obvyklým způsobem a pevně na něj přitlačte po 30 sekund.

## Používání Cohesive® PASTE se <sup>Cohesive</sup> SLIMS®:

1



Očistěte a osušte okolní pokožku a ujistěte se, že je pokožka zbavená rozpouštědel, pudrů a mastných látek.

2



Pro doplnění funkce náplasti **Cohesive SLIMS®** vmáčkněte pastu do kožních záhybů, jizev a nerovných povrchů.

3



Dále přitlačte **Cohesive SLIMS®** na pokožku okolo stomie. Měla by pokrývat celý obvod stomie.

4



Nasadte sáček obvyklým způsobem a pevně na něj přitlačte po 30 sekund.

# Cohesive® PASTE

# Cohesive<sup>®</sup>

## PASTE

Pasta pro péči o stomie nabízí ochranu pokožky a zabraňuje úniku u komplikovanějších stomií.

Velikost balení:  
1

REF:  
839010

Hmotnost:  
60g

eakin<sup>®</sup> 

eakin<sup>®</sup> 

**Eakin CZ s.r.o.**

Hlinky 64, 603 00 Brno, Czech Republic  
**tel.: +420 800 110 110, [www.eakin.cz](http://www.eakin.cz)**

ECPEFLY/2NB (CZ)  
 Manufactured by:  
TG Eakin Limited  
15 Ballystockart Road  
Comber  
Northern Ireland  
BT23 5QY